

# Arjo Liquids Flusher Rinse

Flusher Rinse ist eine milde alkalische Lösung für das automatisierte Spülen von Behältern für menschliche Ausscheidungen sowie Anlagenschläuchen zur Verhinderung von Kalkablagerungen. Es eignet sich zur Anwendung auf alkalibeständigen Oberflächen wie Edelstahl, Keramik, Glas und beständigen Kunststoffen.



## Anweisungen zum Gebrauch

Spülen: 0,5-1,5 ml/l je nach Wasserhärte.  
Dampferzeuger: 1,5-4,5 ml/l je nach Wasserhärte.  
Polysulfon (PSU, PPSU) und ähnliche Materialien vor der Verwendung auf Verträglichkeit testen. Nicht mit anderen Chemikalien mischen.

## Technische Daten

Spezifische Dichte (20 °C): 1,140 (typisch)  
pH-Wert: 9,7 Lieferzustand (typisch)  
pH-Wert: 8,8 bei 1ml/l Wasser (typisch)  
Viskosität: 12,3 cSt

## Sicherheit und Handhabung

Siehe Sicherheitsdatenblatt.

## Haltbarkeit bei Lagerung

24 Monate in originalversiegelten Behältern

## Lagerungsbedingungen

An einem kühlen, trockenen Ort lagern. Vor Frost schützen und von Säuren sowie starken Oxidationsmitteln fernhalten.  
Aufrecht in Originalbehältern lagern.  
Optimale Lagerungstemperatur: 5-25 °C.

## Biologisch abbaubar und recycelbar

Biologisch abbaubare Rezeptur und recycelbare Verpackung.  
Weitere Informationen sind dem Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen.

## Inhaltsstoffe:


Maskierungsmittel, Steininhibitor, Korrosionsschutzmittel.

## BESTELLINFORMATIONEN


### Sprache Artikelnummer 5l Kanister

(DE/NL/FR/IT)	504029301
(EN/PL/CZ/FR)	504029302
(PT/GR/TR/ES)	504029303
(EN/CN/RU)	504029304
(SV/DA/NO/EN)	504029305
(JP/KR/AR/EN)	504029308

### Arjo Liquids Flusher Rinse – Dampferzeuger

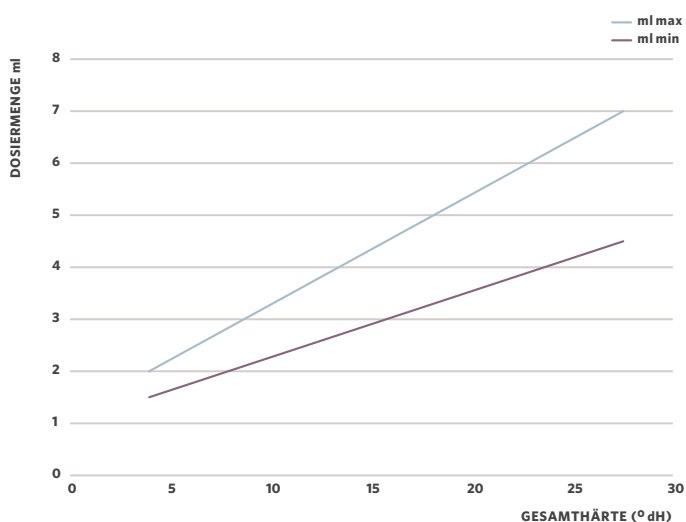

### Arjo Liquids Flusher Rinse – Tankdosierung

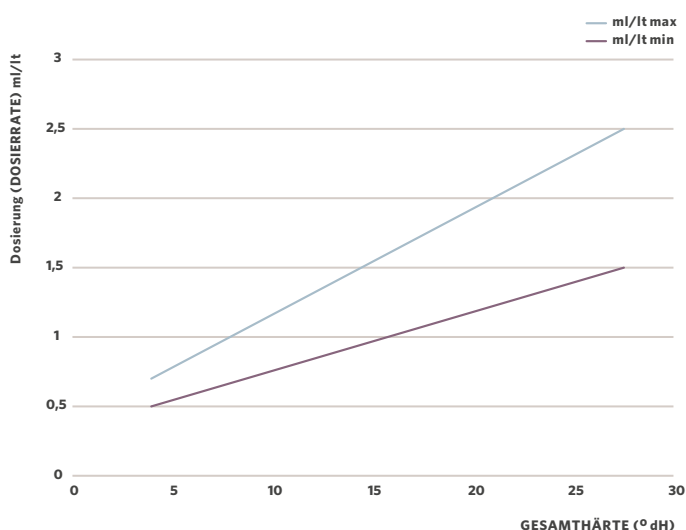

Das Sortiment an Reinigungs- und Kalkbindemitteln von Arjo wurde an Reinigungs- und Desinfektionsgeräten von Arjo entwickelt, getestet und geprüft, um eine kontinuierliche Konformität mit der Norm ISO 15883 zur Wirksamkeit der Reinigung von Medizinprodukten sicherzustellen.

© Arjo, Oktober 2019. Alle Produkte tragen das CE-Zeichen. Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass im Zusammenhang mit den von Arjo gelieferten Geräten und zur Vorbeugung von Verletzungen, die durch die Verwendung von Fremdteilen auftreten könnten, nur Arjo Originalteile verwendet werden dürfen. Bei Nichtbeachtung dieses Hinweises übernehmen wir entsprechend unserer Verkaufsbedingungen keinerlei Haftung. Da wir unsere Erzeugnisse ständig weiterentwickeln, behalten wir uns das Recht auf Änderungen ohne vorherige Ankündigung vor. Arjo.A001671.1.DE

Arjo Deutschland GmbH • Peter-Sander-Straße 10 • 55252 Mainz-Kastel • Deutschland • +49 6134-186 0  
 Arjo AG • Fabrikstrasse 8/Postfach • 4614 Hügendorf • Schweiz • +41 (0) 61 337 97 77  
 Arjo GmbH • Lemböckgasse 49A • 123 Wien • Österreich • +43 (0) 866 56

**arjo**